

Sanctuary Dental Dam Kit

13 cm (W) x 15 cm (H)

Front

Sanctuary® 圣逸康®

使用说明书

产品名称：橡皮障器械包

产品规格型号：橡皮障器械包规格型号列表

品名	型号
橡皮障夹	RDC210, RDC211, RDC207, RDC2, RDC2A, RDC201, RDC202, RDC203, RDC204
橡皮障打孔器	RDPN1
橡皮障夹钳	RDPL1
橡皮障支架	RDFR1, RDFR2

结构及组成：

橡皮障器械包括橡皮障夹、橡皮障打孔器、橡皮障夹钳、橡皮障支架等四种器械。均由不锈钢材料制成。

预期用途：

橡皮障夹：用于将橡皮障向下固定到露出的牙齿。

橡皮障打孔器：用于在牙科橡皮障上打不同直径的孔。

橡皮障夹钳：用于放置和移除牙科橡皮障。

橡皮障支架：用于在手术过程中保持橡皮障拉伸状态。

产品描述：

橡皮障夹：橡皮障固定件，通常由弹簧钢制造，由两个能紧密贴合牙齿轮廓的夹爪及一个或者两个连接夹爪的弓形物组成。可重复使用。

橡皮障打孔器：钳状牙科器械，用于在橡皮障中打出不同尺寸的孔，以便橡皮障穿过牙冠。可重复使用。

橡皮障夹钳：通常具备永久性连接把手（可回转，呈剪刀型），作业端具有较小的突出部分，能够进入到橡皮障夹的孔中，且带有一个滑动锁定机构，在移动橡皮障夹时将把手锁定就位。可重复使用。

橡皮障支架：使橡皮障保持拉伸状态以便于手术操作的弹性边框。通常由一根较粗的U形杆制成。在整个杆上间隔有一些较小的钩状保持器。可重复使用。

使用说明：

· 准备使用：

1. 检查器械是否完好。

2. 该器械是非无菌的。

a) 因此需要对产品进行灭菌。

b) 在灭菌或干燥过程中，保证器械之间有足够的空间，使器械不会彼此接触。必须使用灭菌包装。

圣逸康

扫码阅览产品介绍

Back

Sanctuary® 圣逸康®

使用说明书

· 使用方法：

1. 用橡皮障打孔器给橡皮障打孔。

2. 根据牙齿大小、位置和牙龈结构，谨慎选择正确尺寸的橡皮障夹。

3. 用橡皮障支架覆盖橡皮障。

4. 用橡皮障钳把橡皮障夹放到牙齿上。

注意事项：

1. 灭菌过程中可能产生污渍。遵守提供的说明书。待蒸汽完全蒸发后再打开盒子。

2. 请勿将本产品用于非预期用途。

3. 于室温下储存本器械。

4. 锋利物体可能撕裂橡皮障。

5. 若发现产品表面有破损或腐蚀现象，应立即停止使用。

禁忌症：对原材料成分过敏者禁止使用。

储存条件：储存温度不高于104° F 或 40° C。

生产日期：见原文标签。

备案人/生产企业：SANCTUARY HEALTH SDN BHD 逸康有限公司

备案人住所：No. 16, Persiaran Perindustrian Kanthan 1, Kawasan Perindustrian Kanthan, 31200 Chemor, Perak, Malaysia.

生产地址：57, Hwanggeum-ro, 109beon-gil, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea.

E-mail: info@sanctuaryhealth.com.my

电话：+60-5-201 2800 传真：+60-5-201 7800

www.sanctuary-dental.com

代理人名称：北京美临达医疗科技有限公司

代理人注册地址：北京市门头沟区龙兴南路6号院3号楼16层1602

代理人电话：(86)-10-53654336

1

2

3

4

产品技术要求编号：国械备20180036号

备案凭证编号：国械备20180036号

修订日期：2021年3月31日

D010101030-02